


HEMOFILTER
CUREFLO™



超滤

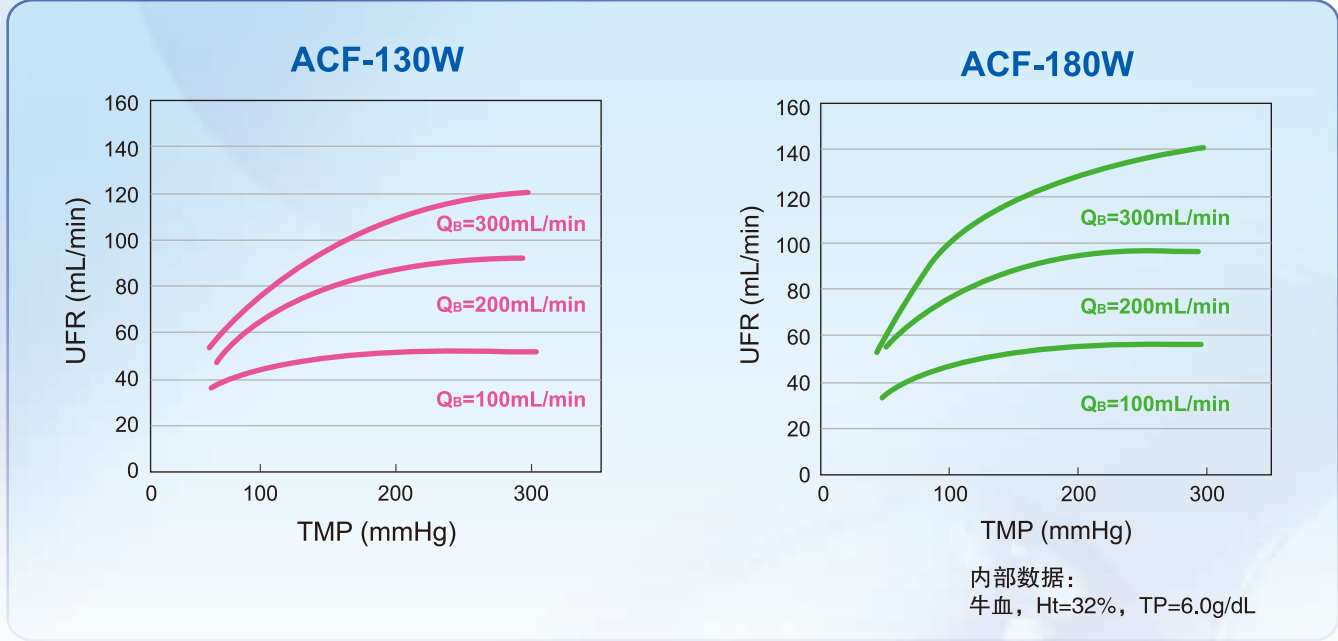

规格

规格		ACF-130W	ACF-180W
中空纤维	材料	聚砜	
	内径	200 μm	
	壁厚	45 μm	
有效膜面积		1.3 m ²	1.8 m ²
预冲量		80 mL	108 mL
最大跨膜压 (TMP, mmHg)		66.6 kPa(500 mmHg)	
灭菌方式		γ射线	

参考文献

Floris M, Marchionna N, Clementi A, Kim JC, Cruz DN, Nalesso F, Zanella M, Garzotto F, de Cal M, Virzi GM, Brendolan A, Ronco C. Evaluation of a new polysulfone hemofilter for continuous renal replacement therapy. Blood Purif. 32:133-8,2011.

AsahiKASEI
旭化成

制造商:
旭化成医疗株式会社
日本国东京都千代田区有乐町一丁目1番2号
邮编: 100-0006
电话: +81-3-6699-3771
传真: +81-3-6699-3773

代理人/售后服务商:
旭化成医疗器械(杭州)有限公司
浙江省杭州经济技术开发区19号大街10号
电话: 0571-86737228
传真: 0571-86714121

北京分公司
北京市朝阳区建国路91号金地中心A座20层2007单元
电话: 010-65694188
传真: 010-65693938

上海分公司
上海市徐汇区淮海中路999号上海环贸广场办公楼一期8层
电话: 021-64726699
传真: 021-24215458

广州分公司
广州市天河区天河路385号太古汇一座3702室
电话: 020-38625790
传真: 020-85271700

AsahiKASEI
旭化成

国械注进20193102437



ACF-130W

ACF-180W

血液滤过器

CUREFLO™
CUREFLO ACF 系列

旭化成医疗株式会社
ASAHI KASEI MEDICAL CO., LTD.

说明

CUREFLO™用来治疗肾功能衰竭以及严重并发症，比如多器官功能衰竭或者心脏和循环系统疾病，包括心功能不全和水肿，这些重症难以用间歇性血液透析进行充分治疗。CUREFLO™通过持续性血液滤过来调整和净化体液（通常情况下需要持续治疗10小时以上）。



CUREFLO™特点


旭化成专门为持续徐缓式血液滤过疗法开发了高流量聚砜膜材料，它具有以下特点：

- 高渗透性及微孔梯度结构的锐利的截留曲线。
- 生物相容性高
- 白蛋白损失低
- 滤过器寿命长


高渗透性及高截留性

微孔梯度结构（致密均匀内表面及多孔外区）具有高渗透性和高截留性的特点。


膜结构

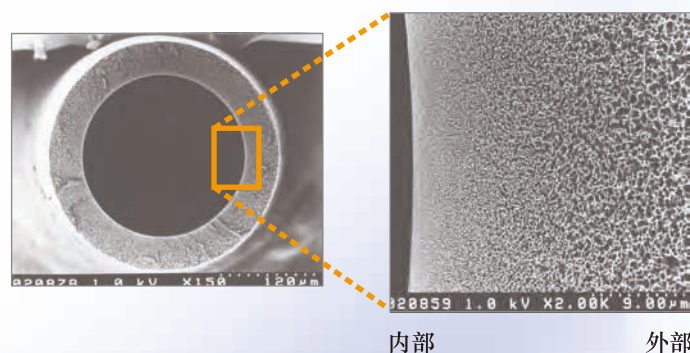


截留曲线

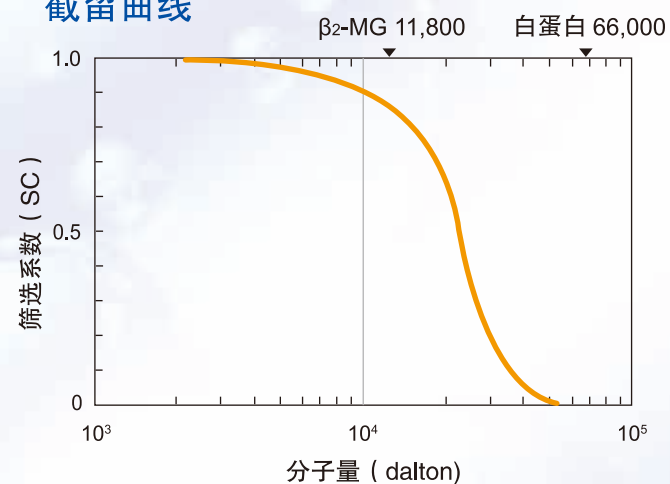

对低分子量蛋白优异的筛分系数

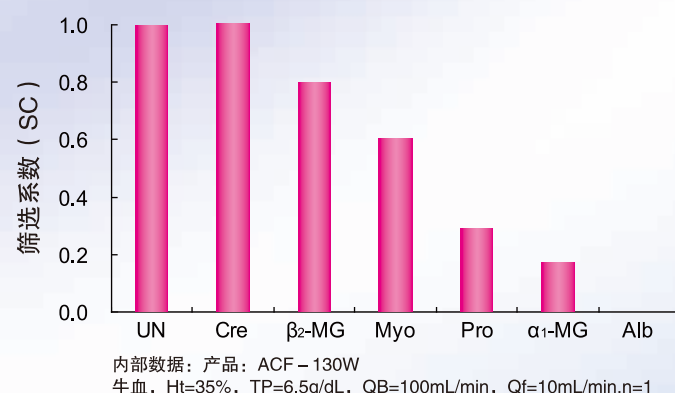


在CVVH模式下测定的溶质的平均筛分系数

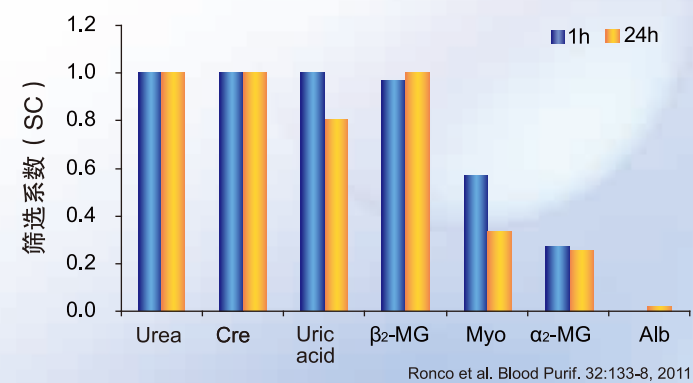


生物相容性高

在治疗期间，WBC、C3a以及中性粒细胞弹性蛋白酶的变化非常小。


WBC

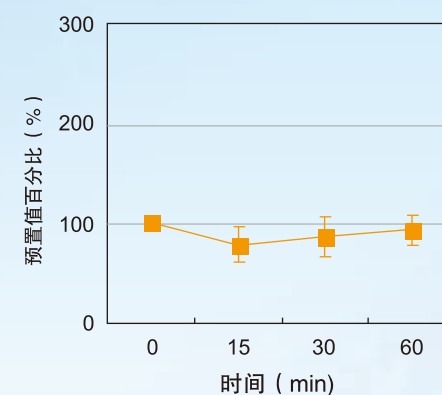

C3a

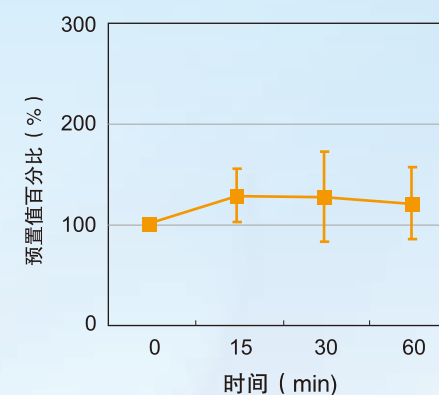


中性粒细胞弹性蛋白酶

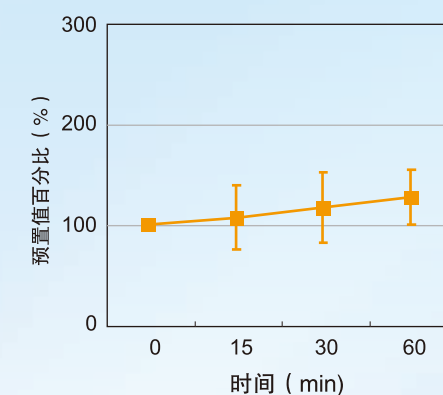

临床资料 病人数：6

白蛋白损失低

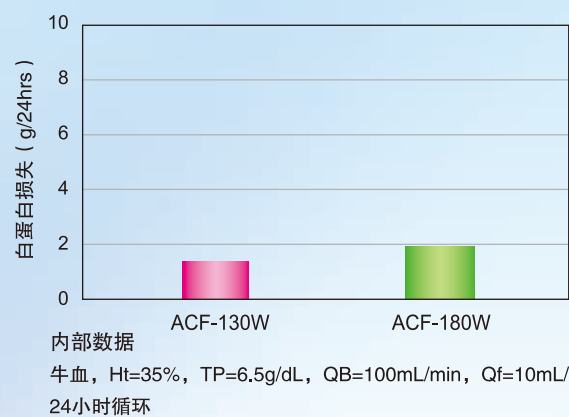

滤过器寿命长

